

押しってもらう車椅子から一歩前進——カルム®

CALM

Comfortable Activated Luxurious Mobility



2009. 7. 8

アームレスト



※写真は右仕様です。



No.	商品名	商品番号	数量
1	アームレスト 右	C/005	1
	アームレスト 左	C/004	1
2	アームレスト サイト [®] パ [®] ネル	C/630	1
3	アームレスト クッション	C/329	1
4	アームレスト 高さ調節ツマミ	C/117622	1
5	樹脂キャップ [®] b	C/611	1
6	アームレスト間拡張パ [®] ーツ	C/PJ014	1


※「アームレスト間拡張パーツ」は2007年7月以降にご注文いただいた製品のみに対応になります。
 ※「樹脂キャップ[®] b」はアームレスト及び本体フレームで兼用できます。

フットレスト



No.	商品名	商品番号	数量
1	フットレスト 右	C/049a	1
	フットレスト 左	C/048a	1
2	フットプレート	C/206	1
3	フットプレートパイプ	C/203204	1
4	フットプレート角度調節クランプ	C/225	1
5	樹脂キャップ c	C/218a	1

フットレスト(オプション)

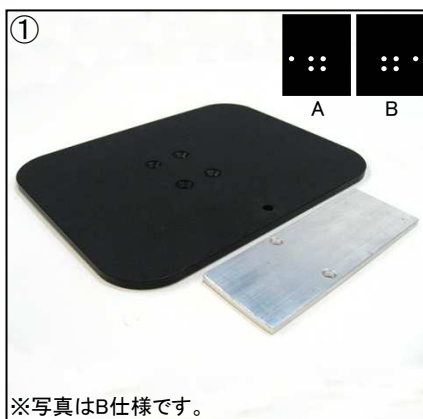

No.	商品名	商品番号	数量
1	フットプレート(大) A	C/PJ015	1
	フットプレート(大) B	C/PJ016	1
2	レッグレストベルト 右	C/PJ017	1
	レッグレストベルト 左	C/PJ018	1

サイドブレーキ



No.	商品名	商品番号	数量
1	サイドブレーキ 右	C/317	1
	サイドブレーキ 左	C/318	1
2	サイドブレーキ ストレートバー	C/714103	1
3	クランプ	C/323	1
4	パイプカバー	C/430	1

転倒防止補助輪




No.	商品名	商品番号	数量
1	転倒防止補助輪 右	C/007	1
	転倒防止補助輪 左	C/006	1
2	樹脂ホイール	C/606	1

レッグレスト




No.	商品名	商品番号	数量
1	レッグレスト	C/PJ110	1

座面部

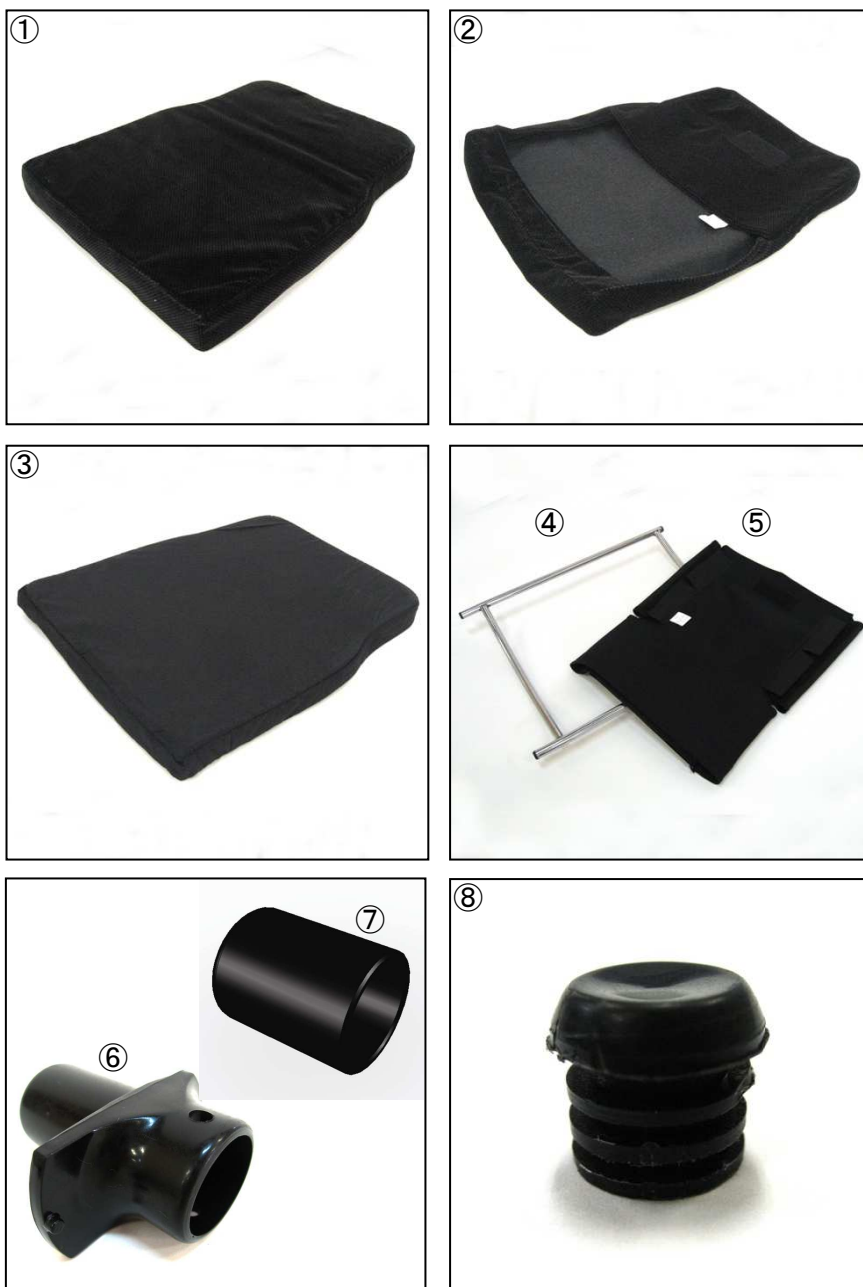

No.	商品名	商品番号	数量
1	座面クッション	C/PJ113	1
2	座面カバー	C/PJ104	1
3	ウレタン(二層)カバー付	C/PJ101	1
4	座面フレーム	C/063	1
5	座面ベースシート	C/PJ105	1
6	クロスキャップ a	C/505	1
7	クロスキャップ b	C/506	1
8	樹脂キャップ d	C/713	1

バックレスト

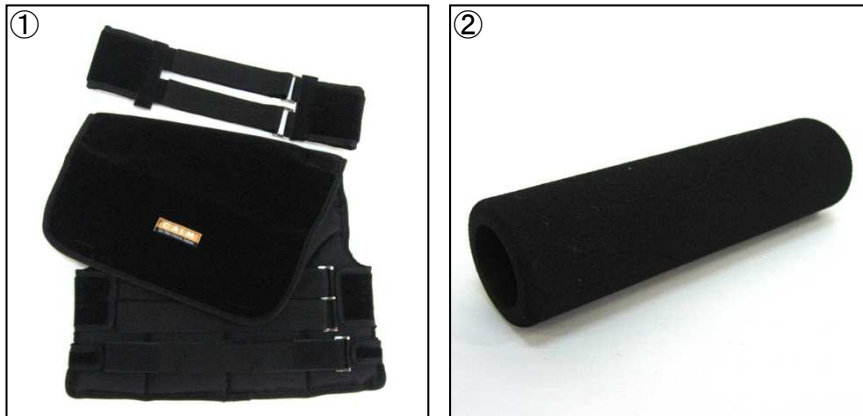

No.	商品名	商品番号	数量
1	バックレスト	C/PJ111	1
2	ハンドグリップ	C/328	1

キャスタ



No.	商品名	商品番号	数量
1	キャスタ 4" 右	C/801	1
	キャスタ 4" 左	C/800	1
2	キャスタ 5" 右	C/009	1
	キャスタ 5" 左	C/008	1
3	キャスタ 6" 右	C/803	1
	キャスタ 6" 左	C/802	1
4	キャスタホイール 4"	C/140408	1
5	キャスタホイール 5"	C/312	1
6	キャスタホイール 6"	C/140637	1
7	樹脂キャップ a	C/610	1

駆動輪



No.	商品名	商品番号	数量
1	駆動輪ハント`リンク`付 22×1 ノーハ`ンク	C/309	2
2	駆動輪ハント`リンク`付 24×1 エア`タイヤ	C/805	1
3	クイックリリースシャフト	C/307	1

縫製品一式



No.	商品名	商品番号	数量
1	縫製品一式	C/PJ115	1

※縫製品一式の中に折りたたみベルトは含まれていません。